

減圧式採血器 マイクロレット チョイスの使い方

1 穿刺します。

止まるまで押す。



採血部位にマイクロレットチョイスの先端(キャップ部分)を強く押しあて、ノブを押します。カチッという音とともに穿刺されます。

※採血部位は裏面を参照ください。写真は前腕からの採血例です。

2 血液を吸引します。

力をゆるめる。



先端部分を密着させたまま、ノブを元の位置までもどし、押しあてていた力をゆるめます。皮膚が盛り上がり、血液が出はじめます。

※この状態で無理に先端を皮膚から離すと、血液が飛び散るおそれがあります。

3 減圧を元にもどします。

ゆっくり押す。



米粒大の血液が滴状に出たことを確認します。皮膚の盛り上がりが無くなり、自然に離れるまで、再度ノブをゆっくり押します。

※押しすぎると再度穿刺されますので3/4程度で止めるよう、ご注意ください。

4 マイクロレットチョイスをはずします。



皮膚の盛り上がりが無くなったから、本体を横に倒すようにして、静かに皮膚から離します。

※センサー内に必要量の血液を満たすことが重要です。



お問い合わせコーナー/平日(月~金)9:00~17:30

 **0120-123119**

製品に関するお問い合わせはフリーダイヤルへ(料金無料)

バイエル メディカル株式会社

〒100-8263 東京都千代田区丸の内1-6-5

FD1102

Bayer 

バイエル メディカル

Making a positive
difference to human health